

## INSTRUÇÕES DE USO

Selante de fóssulas e fissuras com flúor

## 1. Identificação do Produto:

### 1.1. Nome técnico:

Selante para fóssulas e fissuras com flúor

### 1.2. Nome comercial do produto:

YSEAL

### 1.3. Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação:

YSEAL é um selante resinoso fotopolimerizável para fóssulas e fissuras de dentes posteriores.

YSEAL forma uma barreira contínua e resistente que dificulta a adesão de placa bacteriana e restos alimentares, visando prevenir o desenvolvimento de cárie dental em pacientes de alto risco de cárie e em dentes recém-erupcionados.

### 1.4. Especificações e características técnicas:

#### 1.4.1 Composição

Componentes
Monômeros metacrilatos
Carga ionométrica
Fluoretos
Nanopartículas de sílica
Iniciadores
Estabilizadores
Pigmentos

## 2. Armazenamento:

YSEAL deve ser acondicionado em temperaturas entre 2 a 28°C e em local seco. O produto YSEAL deve ser utilizado em temperatura ambiente (23°C) e não deve ser exposto ao calor e à luz solar, ou outras fontes de luz direta.

## 3. Instruções para uso:

### 3.1. Técnicas de Aplicação

Após a limpeza da superfície dentária, incluindo fóssulas e fissuras, proceder com os seguintes passos:

- Certifique-se que as superfícies estejam livres de cáries;
- Isolar o quadrante a ser selado com dique de borracha ou roletes de algodão e sugador, garantido que as superfícies mantenham-se secas;
- Aplicar o gel de ácido fosfórico a 37% sobre o esmalte por 30 segundos;
- Remover o gel de ácido fosfórico com um spray de ar e água e secar com jato de ar até obter uma superfície fosca e esbranquiçada;

- Fixar a ponta aplicadora na seringa e dispensar o produto diretamente sobre a superfície oclusal. Com o auxílio de um pincel ou microaplicador descartável, espalhar o produto para recobrir as áreas de interesse. Fotopolimerizar durante 20 segundos;

- Remover o isolamento e realizar o ajuste oclusal se necessário.

## 4. Precauções, restrições, advertências:

### 4.1. Precauções

- O adesivo YSEAL deve ser utilizado por profissionais;
- Manter o produto fora do alcance de crianças.

### 4.2. Restrições e Advertências:

- Olhos: pode causar irritação moderada;
- Pele: pode causar irritação moderada;
- Ingestão: pode causar irritação gástrica;
- Inalação: pode causar irritação do trato respiratório superior;
- Alergia: o produto é contraindicado para pessoas alérgicas aos componentes da fórmula;
- Evitar o contato direto de YSEAL com a pele e com os olhos. Em caso de contato, remover o material imediatamente e lavar abundantemente com água e sabão.

## 5. Indicação:

Selamento de fóssulas e fissuras de dentes decíduos e permanentes:

- de pacientes com alto risco de cárie;
- de dentes recém-erupcionados;
- de dentes com anatomia de difícil higienização.

## 6. Validade

Datas de fabricação e validade vide embalagem.

---

A Yller Biomateriais SA não se responsabiliza por danos, de qualquer natureza, causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:

**Yller Biomateriais SA**

Endereço: Av. São Francisco de Paula,  
3852, Pelotas/RS

Tel.: (53) 3027 3933

[www.yller.com.br](http://www.yller.com.br) / [sac@yller.com.br](mailto:sac@yller.com.br)

CNPJ: 16.970.346/0001-52

Responsável técnico:

Aline de Oliveira Ogliari

CRO/RS N° 19623

Registro ANVISA N°: 81009350011