



INSTRUÇÕES DE USO

Pigmentos fotopolimerizáveis para impressão 3D

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1.1. Nome técnico

Pigmentos fotopolimerizáveis para impressão 3D

1.2. Nome comercial do produto

COSMOS CREATION – Shades para maquiagem

1.3. Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação

COSMOS CREATION são pigmentos fotopolimerizáveis para maquiagem de elementos dentais fabricados por impressão 3D.

1.4. Especificações e características técnicas

1.5.1. Composição

Componentes
Oligômeros
Monômeros
Fotoiniciadores
Estabilizante
Pigmento

2. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, com temperatura entre 2 e 28°C.

3. INSTRUÇÕES PARA USO

- Selecione a cor de Cosmos Creation desejada e com auxílio de um pincel, aplique conforme necessidade, nunca ultrapassando camadas de 0,3mm de espessura;

- Realizar a fotopolimerização em câmara UV de pelo menos 36W de potência. Para cada aplicação, fotoativar por pelo menos 2 minutos. Após aplicação das camadas pigmentantes, aplicar uma camada final de Cosmos Creation Glaze e fotopolimerizar por 5 minutos para garantir uma excelente dureza superficial.

4. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

4.1. Precauções

- O produto deve ser utilizado por profissionais;
- Manter o produto fora do alcance de crianças.

4.2. Restrições e Advertências

- Não utilizar em pessoas com histórico de alergia a acrilatos e metacrilatos.

5. INDICAÇÃO

- Caracterização de provisórios dentais;
- Caracterização de próteses fixas e removíveis.

6. VALIDADE

Datas de fabricação e validade vide embalagem.

7. REGISTRO DO PRODUTO

Reg. Anvisa N°: 81009350022

A Yller Biomateriais SA não se responsabiliza por danos, de qualquer natureza, causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:

YLLER BIOMATERIAIS SA

Endereço: Av. São Francisco de Paula, 3852

Tel.: +55 51 32727460

www.yller.com.br / sac@yller.com.br

CNPJ: 16.970.346/0001-52

Responsável técnico:

Aline de Oliveira Oglari

CRO/RS N° 19623

Registro ANVISA N°: 81009350022