



INSTRUÇÕES DE USO

Pigmento fotopolimerizável para impressão 3D

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1.1. Nome técnico

Pigmento fotopolimerizável para impressão 3D

1.2. Nome comercial do produto

COSMOS CREATION - Shade para maquiagem

1.3. Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação

COSMOS CREATION GLAZE é uma resina fotopolimerizável para todo o tipo de trabalho em acrílicos, resinas compostas e partes produzidas por impressão 3D.

1.4. Especificações e características técnicas

1.4.1. Composição

| Componentes |
|-----------------|
| Oligômeros |
| Monômeros |
| Fotoiniciadores |
| Estabilizante |

2. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, com temperatura entre 2 e 28°C.

3. INSTRUÇÕES PARA USO

- Aplique uma fina camada de Cosmos Creation Glaze sobre a superfície do trabalho e deixar agir por 30s antes de fotopolimerizar;
- Realizar a fotopolimerização em câmara de luz UV de pelo menos 36W de potência por 2 minutos;
- Caso necessário, aplicar uma nova camada e fotopolimerizar novamente por 2 minutos.

4. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

4.1. Precauções

- O produto deve ser utilizado por profissionais;
- Manter o produto fora do alcance de crianças.

4.2. Restrições e Advertências

- Não utilizar em pessoas com histórico de alergia a acrilatos e metacrilatos.

5. INDICAÇÃO

- caracterização de provisórios dentais;
- caracterização de próteses fixas e removíveis.

6. VALIDADE

Datas de fabricação e validade vide embalagem.

7. REGISTRO DO PRODUTO

Reg. Anvisa N°: 81009350022

A Yller Biomateriais SA não se responsabiliza por danos, de qualquer natureza, causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:

YLLER BIOMATERIAIS SA

Endereço: Av. São Francisco de Paula, 3852

Tel.: +55 51 32727460

www.yller.com.br / sac@yller.com.br

CNPJ: 16.970.346/0001-52

Responsável técnico:

Aline de Oliveira Ogliari

CRO/RS N° 19623

Registro ANVISA N°: 81009350022